

## FAQ

**01 Wie viel Platz wird für den Aufbau benötigt?**

Die erforderliche Grundfläche für den Üben und die Box sowie den Monitor beträgt etwa 2 x 1m. Die Box kann auf jeder ebenen Unterlage mit den Maßen 40 x 50cm (u.U. unter Erhöhung der Auflagefläche) aufgestellt werden.

**02 Ist die Toolbox transportierbar?**

Die Lübecker Toolbox kann von einer Person bequem getragen und an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden.

**03 Wie aufwendig ist der Aufbau eines Lübecker Toolbox-Arbeitsplatzes?**

Wenn alle erforderlichen Komponenten vorliegen, dauert die Installation eines Arbeitsplatzes nicht länger als 15 Minuten.

**04 Wird ein Monitor mitgeliefert?**

Der Monitor (herkömmlicher TV-Monitor) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**05 Was benötige ich ausser der Toolbox zum Üben?**

Ein Monitorkabel, zwei Trokare, die Instrumente (eine gebogenen Schere, zwei Overholts, zwei Nadelhalter) und das Nahtmaterial (geflochtener Faden, 3-0, SH-Nadel).

**06 Kann ich mich bei erfolgreichem Abschluss des Curriculums zertifizieren lassen?**

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Es ist beabsichtigt, Prüfzentren zu etablieren, die nach erfolgreich abgeschlossenem Test und Nachweis der Dokumentation über das durchlaufende Curriculum Zertifikate vergeben. Eine CME-Akkreditierung ist geplant.

**07 Welche Möglichkeiten habe ich, mit LTB Limited in Kontakt zu treten?**

Sie können uns per Email unter der folgenden Adresse kontaktieren: [ltb@luebeck-toolbox.com](mailto:ltb@luebeck-toolbox.com)

**08 Wo finde ich die Ergebnisse der Untersuchungen, auf denen die Entwicklung basiert?**

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine publizierten Artikel vor. Entsprechende Manuskripte wurden für den Peer-Review-Prozess eingereicht. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Kongressbeiträge.

**09 Kann ich mit der Lübecker Toolbox auch andere Übungen machen als die im Curriculum und durch die Module vorgegebenen?**

Prinzipiell ja. Die Module werden über vier kleine Magnete an entsprechenden Stellen der Bodenplatte fixiert. Gelingt es dem Nutzer, eigens entwickelte Übungen entsprechen an der Bodenplatte zu fixieren, könnte auch damit gearbeitet werden. Der Lernerfolg des Lübecker Toolbox-Curriculums basiert jedoch eindeutig auf den vorgegebenen Übungen. Wird eine geeignete Plastikwanne verwendet, ließen sich sogar Prozeduren an Organpaketen durchführen.

**10 Sind die Toolbox und die Module fertig montiert ?**

Es muss nur die Kamera in der Toolbox installiert und die Module für die einzelnen Übungen mit den beigefügten Materialien bestückt werden (Plastikhülsen, Gummibänder, Komresse, usw). Für die Insertion der Trokare müssen die Gummimembranen eingeschnitten werden.

**11 Wie lange dauert die Lieferung ?**

Maximal 4 Wochen, im Durchschnitt erwarten wir 3 Wochen. Die Lieferung kann bei Bedarf auch über Express beschleunigt werden. Eine Tracking-Nummer wird zur Verfügung gestellt.

**12 Wie lange ist die Garantie ?**

Die Toolbox einschliesslich der Kamera und 4 Module kommt mit einem Jahr Garantie. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**13 Kann ich vom Kauf zurück treten?**

Der Käufer / die Käuferin kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen von Kauf zurücktreten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**14 Wo wird die Toolbox hergestellt ?**

Toolbox und Module werden in der Nähe von Hong Kong von etablierten Herstellern gefertigt. Eine eingehende Qualitätskontrolle aller Komponenten erfolgt in einem Funktionstest des gesamten Systems vor der dem Versand.